

NovoPen Echo®
Geeft meer houvast

Speciaal ontworpen voor kinderen



- **Geheugenfunctie**
Je ziet hoelang geleden en wat de dosis van de laatste injectie was.



- **Stapjes van 0,5 E**
Instelbaar in kleine dosisstappen van 0,5 E tot de maximale dosering van 30 E.



01122-961404-GBR

Novo Nordisk B.V.

Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00

informatie@novonordisk.com
www.novonordisk.nl



Ja! Nu weet ik het weer!



NovoPen Echo®
Geeft meer houvast

NovoPen Echo®

Je dokter heeft je een insuline van Novo Nordisk voorgeschreven. Bij deze insuline hoort een speciaal voor kinderen ontworpen insulinepen: NovoPen Echo®. Het gebruik is eenvoudig: plaats een NovoFine® naaldje op de pen, bepaal met een simpele handomdraai de dosering en druk op de knop. De uitgebreide instructie lees je onder het kopje 'Injecteren met NovoPen Echo®'.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop

NovoPen Echo® is instelbaar in kleine dosisstappen

van een halve eenheid (E), van 0,5 E tot de maximale dosering van 30 E.

Bijzonder aan NovoPen Echo® is dat je aan het uiteinde van de pen kunt zien hoeveel je de laatste keer

hebt geïnjecteerd en hoelang dat geleden is. Zo kan je je daar niet meer in vergissen.

Wanneer je per ongeluk een verkeerde dosis hebt ingesteld kun je dit gemakkelijk herstellen zonder verlies van insuline. Je draait de knop gewoon terug. De pen is verkrijgbaar in rood en blauw, dus als je twee soorten insuline nodig hebt, kun je ze gemakkelijk uit elkaar houden.

Vele toepassingen

- Je kunt NovoPen Echo® gebruiken met insulines van Novo Nordisk, verkrijgbaar in Penfill® patronen.
- NovoPen Echo® is ontworpen voor gebruik in combinatie met NovoFine® naalden.

Injecteren met NovoPen Echo®




1 Haal de dop van de pen af. Plaats de Penfill® patroon in de patroonhouder. De kant met de gekleurde dop moet hierbij als eerste in de houder worden gedaan. Schroef de NovoFine® naald recht op de gekleurde dop. Zorg dat de naald goed vast zit.



2 Trek de doseer-/toedieningsknop uit, als dit nog niet is gedaan en stel 4 eenheden in bij een nieuwe Penfill® patroon of 1 eenheid bij een Penfill® patroon die al in gebruik is.



3 Houd de pen met de naald naar boven. Tik een paar maal zacht tegen de patroonhouder om eventuele luchtbelletjes bovenin de Penfill® patroon te krijgen.

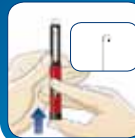

Houd de naald naar boven en druk de doseer-/toedieningsknop in tot je een klik hoort of voelt en een druppel aan de punt van de naald verschijnt.



4 Trek de doseer-/toedieningsknop uit. Stel de dosis in door aan de doseer-/toedieningsknop te draaien totdat de juiste dosis op één lijn staat met de dosisindicator. Halve eenheden worden als streepjes tussen de cijfers aangegeven.



5 Om te injecteren, druk de doseer-/toedieningsknop in totdat je een klik hoort of voelt en het streepje van de dosisindicator op 0 staat.

Laat de naald ten minste zes seconden onder de huid.



6 Zet de naaldverpakking weer voorzichtig terug zonder de naald aan te raken. Schroef de naald los en gooi hem weg volgens de instructies van jouw behandelaar.

Let op:


Voor elke injectie (en bij het in gebruik nemen van een nieuwe Penfill® patroon) moet er een 'airshot' plaatsvinden als test en om de pen te ontluichten. Dit betekent: stap 2 herhalen totdat er een druppel insuline boven aan de naald verschijnt.

Moeiteloos de dosis corrigeren

Je kan de ingestelde dosis corrigeren door de instelknop terug te draaien totdat de juiste dosis in het afleesvenster verschijnt. Hierbij gaat geen insuline verloren.

Volgende injectie

Na het toedienen van een dosis insuline eindigt NovoPen Echo® in de 0-stand. NovoPen Echo® is hierdoor direct klaar (na het uitvoeren van een airshot) voor de volgende injectie.

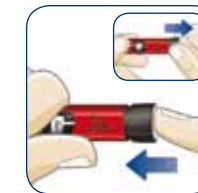

Geheugenfunctie

Om de geheugenfunctie te activeren trek je aan de doseerknop en duw je hem daarna weer terug. In de display kan je nu aflezen hoeveel je de laatste keer hebt geïnjecteerd. Ook verschijnt er een zwart balkje langs de rand van de display voor elk uur dat is verstreken sinds de laatste injectie. Je ziet hoelang geleden

en wat de dosis van de laatste injectie was (zie afgebeeld voorbeeld: een injectie met 5,5 eenheden geïnjecteerd, 1 uur geleden).

Lees voor het gebruik van NovoPen Echo® altijd eerst de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.