



# Gebruik van Levemir<sup>®</sup> InnoLet<sup>®</sup>


- 1 instelschijf
- 2 drukknop
- 3 insulinepatroon
- 4 naaldje

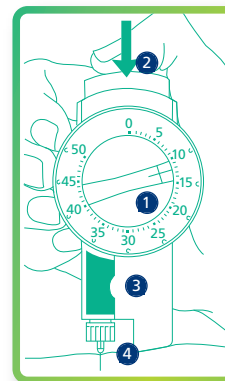


1. Verwijder het afdekplaatje en schroef de NovoFine<sup>®</sup> naald recht en stevig op Levemir<sup>®</sup> InnoLet<sup>®</sup>.
  - Gebruik altijd een nieuwe naald voor elke injectie.
  - Verwijder de naaldverpakking en het beschermdopje.

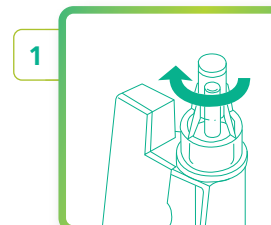


2. Stel 2 eenheden in door de instelschijf met de klok mee te draaien.
  - Houd Levemir<sup>®</sup> InnoLet<sup>®</sup> met de naald omhoog en tik zachtjes tegen de insulinepatroon.
  - Druk de drukknop helemaal in totdat er een druppel insuline bovenaan de naald verschijnt (airshot).
  - Levemir<sup>®</sup> InnoLet<sup>®</sup> is nu ontluicht en de instelschijf komt nu weer op nul.

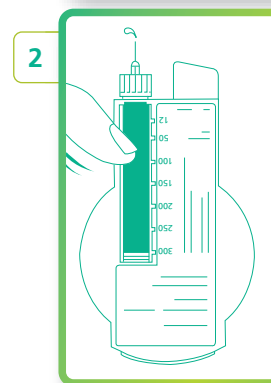

3. Draai nu de instelschijf totdat de juiste dosering is bereikt.

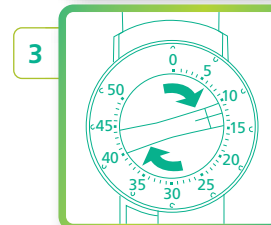

4. Neem Levemir<sup>®</sup> InnoLet<sup>®</sup> in één hand en injecteer de insuline door de drukknop rustig, zo diep mogelijk in te drukken.
  - Houd de drukknop ingedrukt en tel tot 6 voordat u de naald uit de huid trekt.

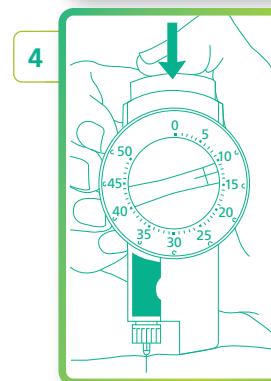

5. Plaats de naaldverpakking weer op de naald en schroef de naald los.
  - Gooi de naald op een geschikte manier weg.

