

# Belangrijke informatie

## NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup> en NovoPen<sup>®</sup> 5

### Ref. 2016050310



Alphen aan den Rijn, 5 juli 2017

Beste meneer, mevrouw,

Novo Nordisk heeft ontdekt dat er een probleem kan zijn met de patroonhouder van een beperkt aantal insulinepenen van het type NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup> en NovoPen<sup>®</sup> 5. De patroonhouder kan beschadigd raken als deze wordt schoongemaakt met bepaalde schoonmaakmiddelen. Als de pen wordt schoongemaakt volgens de instructies in de gebruikershandleiding, is er geen reden om aan te nemen dat de patroonhouder beschadigd raakt.

Uit voorzorg biedt Novo Nordisk diabetespatiënten, die een NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup> en/of NovoPen<sup>®</sup> 5 met de betreffende patroonhouder gebruiken, de mogelijkheid om de patroonhouder kosteloos om te wisselen. **U kunt het chargennummer van uw pen op [www.novonordisk.nl](http://www.novonordisk.nl) invullen om te controleren of de patroonhouder van uw pen verwisseld moet worden.** U kunt hiervoor ook bellen met de afdeling Informatie en Service van Novo Nordisk via 0172-449600 (tijdens kantooruren).

Hieronder zijn twee foto's van de patroonhouder weergegeven (afbeelding 1)



**Afbeelding 1.** Foto's van de patroonhouder die wordt gebruikt in de NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup> en NovoPen<sup>®</sup> 5.

U kunt de chargenummers vinden op de instelknop van de pen, zoals hieronder weergegeven (afbeelding 2).

#### NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup>



#### NovoPen<sup>®</sup> 5



**Afbeelding 2.** De rode vierkanten geven aan waar het chargennummer zich bevindt op de pen. Bijvoorbeeld: het chargennummer op de pen links is FVG7364.

Gebruikt u een andere pen dan NovoPen<sup>®</sup> Echo<sup>®</sup> of NovoPen<sup>®</sup> 5, bijvoorbeeld NovoPen<sup>®</sup> 4, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt erop vertrouwen dat de pen naar behoren werkt.

Het gebruik van een pen met een beschadigde patroonhouder kan er mogelijk voor zorgen dat u minder insuline injecteert dan u heeft ingesteld, al is de kans hierop erg klein. Te weinig insuline kan leiden tot een hogere bloedsuikerspiegel. De verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel (een hyper) treden meestal geleidelijk op en kunnen het volgende omvatten: een rode, droge huid; sufheid of vermoeidheid; droge mond; adem die naar fruit (aceton) ruikt; vaker plassen; dorst; verlies van eetlust; misselijkheid of braken. Het kan ook zijn dat u geen lichamelijke verschijnselen van een hoge bloedsuiker ervaart, maar het pas opmerkt tijdens bloedsuikermetingen.

**Wat u moet doen als u gebruikmaakt van een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5:**

- U kunt het chargenummer van uw pen op [www.novonordisk.nl](http://www.novonordisk.nl) invullen om te controleren of de patroonhouder van uw pen verwisseld moet worden.
- Als uw patroonhouder verwisseld moet worden, registreer dan uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aantal patroonhouders) op onze website, [www.novonordisk.nl](http://www.novonordisk.nl) of neem contact op met de afdeling Informatie en Service via 0172-449600. Na registratie ontvangt u een nieuwe patroonhouder voor uw pen.

**Indien u vermoedt dat uw patroonhouder beschadigd is let dan op het volgende:**

- Stop **nooit** uw behandeling met insuline zonder eerst met uw arts te overleggen.
- Let op uw bloedsuikerspiegels en wees alert op de verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel. Als u een hoge bloedsuiker ervaart meet dan uw bloedsuikerspiegel zoals uw diabetesbehandelaar u dat heeft verteld. Neem vervolgens de juiste maatregelen en neem contact op met uw diabetesbehandelaar.
- Meld alle eventuele bijwerkingen of klachten aan Novo Nordisk via onderstaande contactgegevens.

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken neem dan contact op met Novo Nordisk B.V. of uw diabetesbehandelaar.

De veiligheid van patiënten is van het grootste belang voor Novo Nordisk. Wij streven ernaar om producten van de hoogste kwaliteit te produceren. Wij betreuren de ontstane situatie en de mogelijke ongemakken die dit met zich mee kan brengen.

Met vriendelijke groet,  
Novo Nordisk B.V.



Jonathan van Assendelft-Briers, arts  
Medisch Directeur

**Voor meer informatie:**

Novo Nordisk B.V.  
Afdeling Informatie en Service  
Flemingweg 18  
2408 AV Alphen aan den Rijn

0172-449600 (tijdens kantooruren)  
[informatie@novonordisk.com](mailto:informatie@novonordisk.com)  
[www.novonordisk.nl](http://www.novonordisk.nl)